

Tatrapoint Standard 2

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWALT42

Galleria Immagini



Che cos'è Tatrapoint Standard 2?

La **Tatrapoint Standard 2** è una **macchina dattilobrilie meccanica** che permette la **scrittura in caratteri Braille**. La macchina è ideale per utenti con **disabilità visive in età adulta e in contesti lavorativi**, ma anche per **adolescenti in età scolastica**.

Che cosa fa Tatrapoint Standard 2?

L'utilizzo della **Tatrapoint Standard 2** è **semplice e intuitivo**. Prima di iniziare ad utilizzare la macchina è necessario rimuoverla dalla valigetta, insieme al tappetino di gomma; bisogna poi posizionare la gomma sopra il tavolo e fissare sul piano in gomma la dattilobrilie stessa. Il carrello della macchina da scrivere è fissato, per prevenire eventuali urti durante il trasporto, tramite il posizionamento dei margini al centro dello stesso. Il piano di gomma consente di mantenere la dattilobrilie ben ferma sul tavolo durante la scrittura.

Le levette di blocco margine sono poste nella parte superiore del retro della macchina. Premere il margine destro in avanti verso la tastiera e spostarlo verso destra. Spostare il carrello leggermente a sinistra. Dopo lo sblocco di entrambi i margini possibile impostare il margine destro e quello sinistro nella corretta posizione in base alle dimensioni del foglio e al numero di caratteri per riga.

La **Tatrapoint Standard 2** permette di **scrivere fino a 40 caratteri per riga** nella **versione con carrello di 27.5 cm**. Il campanello **avverte 5 caratteri prima del raggiungimento del margine precedentemente fissato**. La distanza tra i caratteri braille di 6 mm mentre la distanza tra i punti braille dello stesso carattere di 2.7 mm. Il carattere braille si compone tramite la pressione

simultanea dei tasti corrispondenti ai punti da portare in rilievo. Su entrambi i lati del carrello sono posizionati due supporti per il fissaggio del nastro DYMO per la produzione di etichette braille.

Come sono posizionati i tasti?

Per la dattilobraille standard - da utilizzare con entrambe le mani - la **disposizione dei tasti rispetto ai punti braille è la seguente**: il testo centrale lungo la barra spaziatrice; dal centro verso la sinistra ci sono i tasti per i punti 1 2 o 3 mentre dal centro verso destra ci sono i tasti per i punti 4 5 o 6. Sulla parte sinistra della tastiera si trova la **levetta di backspace**. Premendo questa levetta il carrello si sposta di una posizione verso destra permettendo quindi la correzione e la riscrittura dell'ultimo carattere.

Modelli disponibili:

- **Tatrapoint Standard 1**: con una larghezza del rullo di stampa pari a **235 mm** per un massimo di **34 caratteri per riga**
- **Tatrapoint Standard 2**: con una larghezza del rullo di stampa pari a **275 mm** per un massimo di **40 caratteri per riga**

Codice nomenclatore tariffario:

22.12.15.003 - Macchina DattiloBraille Meccanica

Video: