

Parole e frasi

Codice Riferimento e Codice MEPA: SWLAR40



Galleria Immagini



Sistema Operativo: Compatibile con Windows Xp, Windows 7 a 64 bit, Windows 8, Windows 10, Windows 11.

Parole e frasi è un Software didattico ad "accesso facilitato" pensato per esercitarsi alla lettura su vari livelli. E'costituito da 15 attività differenti: SCEGLI L'ARTICOLO INDETERMINATIVO GIUSTO Si tratta di un esercizio che prevede la scelta dell'articolo determinativo giusto per quattro parole presenti nel disegno che fa da sfondo all'esercizio, per ogni attività sono sempre presenti i quattro possibili articoli, l'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. CHI SONO IO ? Si deve associare la figura giusta rispetto al suggerimento proposto dall'esercizio, ci sono 4 diverse figure da associare in maniera sequenziale ai 4 diversi suggerimenti proposti a video. l'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. SI o NO ? Si deve rispondere correttamente SI o NO in maniera sequenziale a 6 domande facenti riferimento a 6 figure presenti in basso nella schermata. l'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. ASSOCIA LA FRASE CORRETTA ALL'IMMAGINE Questo esercizio prevede la scelta di una frase corretta fra le due proposte rispetto ad una immagine. l'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. ASSOCIA L'IMMAGINE ALLA FRASE Si deve associare l'immagine corretta rispetto alle quattro proposte in basso nello schermo in funzione

della frase proposta nella quale si trova la parola associata all'immagine. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **COLORA L'IMMAGINE** Si deve colorare l'immagine secondo il suggerimento proposto dalla frase ad essa associata, si può scegliere fra 4 colori diversi l'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **COMPLETA LA FRASE** Si devono completare le 4 frasi proposte in maniera corretta rispetto a 4 parole che si possono scegliere, le frasi fanno riferimento a situazioni che si evidenziano in un disegno presente nello sfondo dell'esercizio. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **SCEGLI LA PAROLA GIUSTA PER COMPLETARE LA FRASE** Si deve scegliere la parola giusta fra le 2 proposte per completare correttamente la frase. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **PAROLE CROCIATE** Si tratta di un semplice esercizio di parole crociate, strutturato di solamente 3 parole che devono essere indovinate con l'aiuto di una frase e di una immagine, l'attività non si può svolgere attraverso l'uso della scansione. **GIUSTO O SBAGLIATO ?** Si deve rispondere Giusto o sbagliato in maniera sequenziale a 4 affermazioni facenti riferimento ad un disegno sullo sfondo dell'esercizio. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **COSTRUISCI UNA FRASE** Si deve costruire una frase riferita ad una situazione rappresentata nel disegno sullo sfondo dell'esercizio con le parole presenti a schermo. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **QUALE PAROLA NON C'ENTRA ?** In questo esercizio si deve identificare fra 4 diverse parole quella che non ha attinenza rispetto all'ambito comune delle altre 3. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **QUANTI SONO?** Si deve selezionare la parola facente riferimento al numero corretto di oggetti presentati a schermo. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **QUAL'E' LA PAROLA GIUSTA ?** Occorre scegliere fra le 4 evidenziate la parola giusta rispetto all'immagine proposta. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a uno o a due sensori. **CATTURA LE PAROLE GIUSTE** L'esercizio consiste nel catturare muovendo nelle 4 direzioni alto basso destra sinistra un simpatico animaletto in un prato le parole suggerite dall'esercizio presenti sul prato stesso. L'attività può essere svolta con l'utilizzo della scansione a due sensori. **PAROLE E FRASI** prevede anche un Editor che permette di personalizzare e aggiungere facilmente i contenuti degli esercizi proposti.

Classificazione ISO 9999:

05.15.06 - Ausili per la codifica e la decodifica del linguaggio scritto